

簡便に使用できる環境清掃用除菌中性洗剤

キンサール G-500

使用用途：床、壁、シンク・作業台、洗浄機器外壁、ドアノブ、ベットの柵などの清掃・除菌


特徴：洗浄と除菌が同時に行える。
：少量タイプ（500ml）で使用しやすい。
：そのまま使用する事が可能。（スプレーガンを取り付ける事で簡便にスプレーする事も可能。）
：中性のため各材質への影響もありません。

使用方法：モップや布・清拭クロスなどに本品をつけて湿式清掃をしたあと、充分水拭きをする。
：スプレーガンを使用する場合は直接使用する箇所へスプレーし湿式清掃をしたあと、充分水拭きをする。
※電気製品などには直接スプレーすると機械内部にかかることがありますので
布・清拭クロスなどにスプレーして使用して下さい。

組成：アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド
（塩化ベンザルコニウム）
ジデシルジメチルアンモニウムクロライド
ポリヘキサメチレンピグアニジン塩酸塩
ポリオキシアルキレンアルキルエーテル

性状：外観・・・緑色液状
pH・・・中性

容量：500ml×6本入り

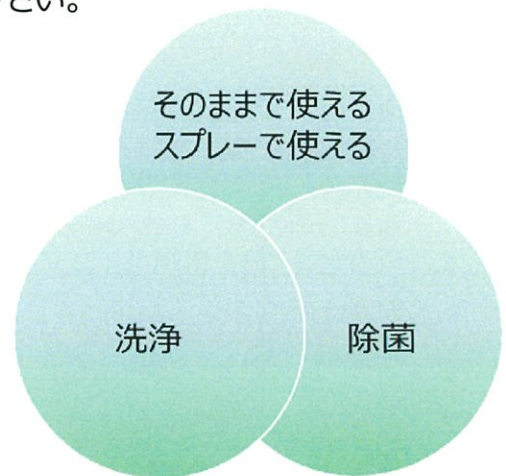


【使用上の注意】

- ・使用時は防護メガネ、マスク及びゴム手袋の保護具を着用する。
- ・アニオン系界面活性剤及び塩素系殺菌剤とは沈殿を生じる為、併用は出来ません。
- ・ステンレス製以外の器材（アルミ、銅、真鍮、ゴム、樹脂など）は変化をきたす場合があるので、予め試験をしてから使用する。
- ・初めてのご使用時には、一度に広い面を清拭せずに確認してからご使用下さい。
- ・本剤は食品添加物ではありません。機器、装置類、床などに使用した場合は充分に水拭きして下さい。

<応急処置>

- ・眼に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上水洗し、医師の処置を受ける。
- ・皮膚などに付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば医師の処置を受ける。
- ・誤飲した場合は、口の中を水で洗い、水又は牛乳を飲む。無理に吐かせない。直ちに医師の処置を受ける。
なお本品は飲食できません。

キンサールG-500はこんな場面で使用できます！

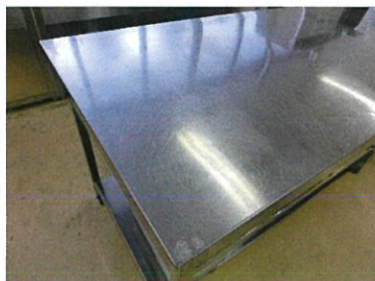

- ・手術室の床・壁
- ・シンクの清掃
- ・作業台の清掃
- ・洗浄機器の外壁清掃など

キンサールG-500との相性もバッチリ！



マイクロファイバークロス（クロスワイブ）や
マイクロファイバースティック（クロススティック）
を併用するとより効果的です。

・キンサールG-500の各試験菌に対する除菌効果

供試菌	作用時間	試験結果	供試菌	作用時間	試験結果
Staphylococcus aureus IFO 12732 (黄色ブドウ球菌)	1分	-	Beillus cereus IFO 3457 (セレウス菌)	30秒	+
	2分	-		60秒	+
	5分	-		90秒	-
	10分	-			
Escherichia coli IFO 3301 (大腸菌)	1分	-	Serratia marcescens IFO 3046 (セラチア)	30秒	-
	2分	-		60秒	-
	5分	-		90秒	-
	10分	-			
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (酵母)	1分	+	Lactobacillus plantarum ATCC 8014 (乳酸菌)	30秒	+
	2分	-		60秒	-
	5分	-		90秒	-
	10分	-			

+ : 菌の生育を認める - : 菌の生育を認めず

